

NOTE D'INFORMATION

Sujet : Délestage d'électricité

Objet : Consignes sur les dispositifs électro-médicaux distribués par WINNCARE

Des programmes de délestage d'électricité sont envisagés par le gouvernement français si les mesures de sobriété s'avéraient insuffisantes, notamment en cas d'hiver rigoureux¹.

Face aux enjeux de la sécurité d'approvisionnement associée à deux principaux types de risques (pointes de consommation et fluctuations à l'échelle horaire, journalière ou hebdomadaire), nous devons garantir la sécurité liée à l'utilisation de nos dispositifs électro-médicaux.

Si les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) font partie de la liste limitative d'usagers non délestables², les lieux de soins à domicile pourraient voir leurs activités perturbées dès lors qu'il s'agit d'utiliser des dispositifs électro-médicaux.

En tant que partenaire nous nous devons de vous informer de la conduite à tenir avec les produits de la gamme WINNCARE France et PHARMAOUEST Industries groupe WINNCARE en cas de délestage d'électricité :

	Cause et mesure préventive	
Dispositifs médicaux WINNCARE	Délestage annoncé	Coupage de courant inopinée
Lits médicaux	Anticiper en mettant le sommier du lit à plat et à mi-hauteur	<p><u>Option 1</u> : Utilisation d'un onduleur type ordinateur (PC)</p> <p><u>Option 2</u> : Mettre le sommier à plat (fonction CPR)</p> <p><u>Option 3</u> : Si hauteur variable en position haute et/ou absence de fonction CPR alors transfert du patient vers fauteuil ou autre lit avec aide technique</p>
Appareils de transfert	Maintenir en continu la charge du dispositif	
Support à air motorisé Gamme AXTAIR	Durée délestage < 2 heures	Durée délestage ≥ 2 heures
	Arrêter l'alarme sonore. Redémarrage automatique au retour du courant électrique	Déconnecter le tuyau d'alimentation en air du surmatelas et l'obstruer au moyen du bouchon attenant.
Support à air motorisé CAIRFLOW EVO (DIGITAL)	Durée délestage < 2 heures	Durée délestage ≥ 2 heures
	Arrêter l'alarme sonore Déconnecter le tuyau d'alimentation en air du surmatelas et l'obstruer au moyen du bouchon attenant.	Transférer le patient vers un fauteuil ou autre lit avec une aide technique.

Point de contact : sav@winnicare.fr (02 51 98 39 24) ; sav.air@pharmaouest.fr (09 72 58 97 30)

¹ [Instruction](#) du Gouvernement du 16 septembre 2022 relative à l'organisation de la répartition et du délestage de la consommation de gaz naturel et de l'électricité dans la perspective du passage de l'hiver 2022-2023 et à l'accélération du développement des projets d'énergie renouvelable.

² [Arrêté](#) du 5 juillet 1990 fixant les consignes générales de délestage sur les réseaux électriques prévoit une liste limitative d'usagers non délestables.

