

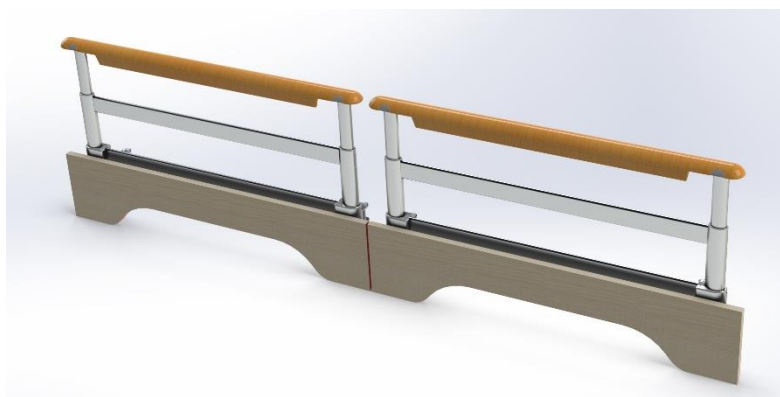


MANUEL D'UTILISATION BARRIERES ALUMINIUM TELESCOPIQUES

A688-00

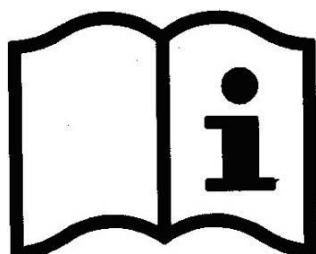

A689-00

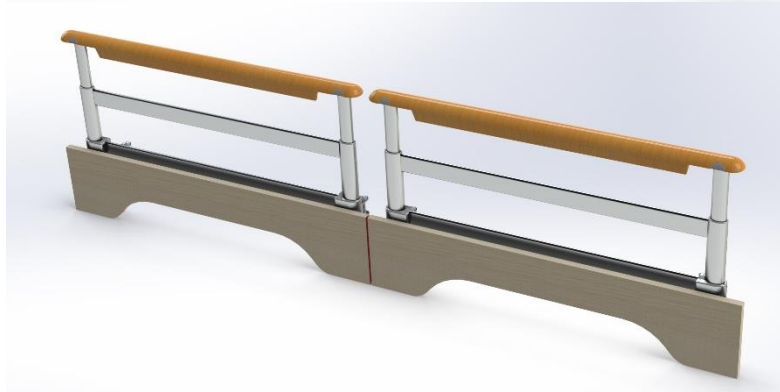

1. CONDITIONS DE TRANSPORT	2
2. CONDITIONS DE STOCKAGE	2
3. CONDITIONS DE MONTAGE	3
3.1. DESCRIPTION GENERALE	3
3.2. MONTAGE	3
4. CONDITIONS D'UTILISATION	4
4.1. FONCTION	4
4.2. UTILISATION	4
4.3. PRECAUTIONS D'EMPLOI	6
4.4. RISQUES RESIDUELS	6
5. CONDITIONS DE MAINTENANCE	6
5.1. IDENTIFICATION	6
5.2. ENTRETIEN	7
5.3. NETTOYAGE	7
5.4. DESINFECTION	7
5.5. DUREE DE VIE	7
5.6. GARANTIES	7
6. CONDITIONS DE MISE AU REBUT	7

Madame, Monsieur,

Vous avez acquis un accessoire médical WINNCARE et nous vous remercions de votre confiance.

Nos lits et leurs accessoires sont conçus et fabriqués dans le respect des exigences essentielles qui leurs sont applicables selon la directive européenne 93/42/CEE et 2007/47/CE.

Ils sont testés en conformité avec la norme CEI 60601-2-52 (2009) dans leurs configurations commerciales incluant les panneaux et les matelas de notre fabrication, afin de vous assurer une sécurité et une performance maximales.

Par conséquent, le respect des conditions d'utilisation préconisées par WINNCARE et l'utilisation de panneaux et accessoires d'origine conditionne le maintien des clauses de garantie du bien au contrat et vous assure une utilisation sécurisée du lit médical et de ses accessoires.

1. CONDITIONS DE TRANSPORT

Les barrières doivent être transportées dans leur emballage d'origine.

ATTENTION : il est formellement interdit de gerber les colis sur les barrières.




Il est formellement interdit de gerber les colis dont le poids dépasse 60kg/m² quelle que soit leur position.

2. CONDITIONS DE STOCKAGE

Les barrières doivent être stockées à plat et à l'abri de l'humidité (humidité relative comprise entre 30% et 75%), dans un local sec et tempéré (entre 15°C et 25°C), dans leur emballage d'origine.

Pression atmosphérique comprise entre 700hPa et 1060hPa en respectant les mêmes conditions que pour le transport.

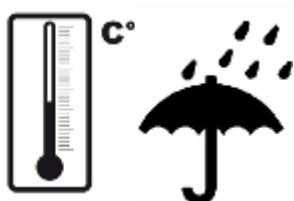


Respecter les conditions d'environnement spécifiées

3. CONDITIONS DE MONTAGE

Veillez à toujours associer les barrières avec le lit conformément au tableau ci-dessous :

Référence lit	Référence barrières	Référence lit	Référence barrières
XN...	A688-00 / A689-00	AF...	A688-00 / A689-00
XO...	A688-00 / A689-00	AX...	A688-00 / A689-00
XH...	A688-00 / A689-00	XA...	A688-00 / A689-00
MS...	A688-00 / A689-00	XB...	A688-00 / A689-00
AE...	A688-00 / A689-00	DO...	A688-00 / A689-00
AH...	A688-00 / A689-00	AG...	A688-00 / A689-00
Al...	A688-00 / A689-00		

3.1. Description générale

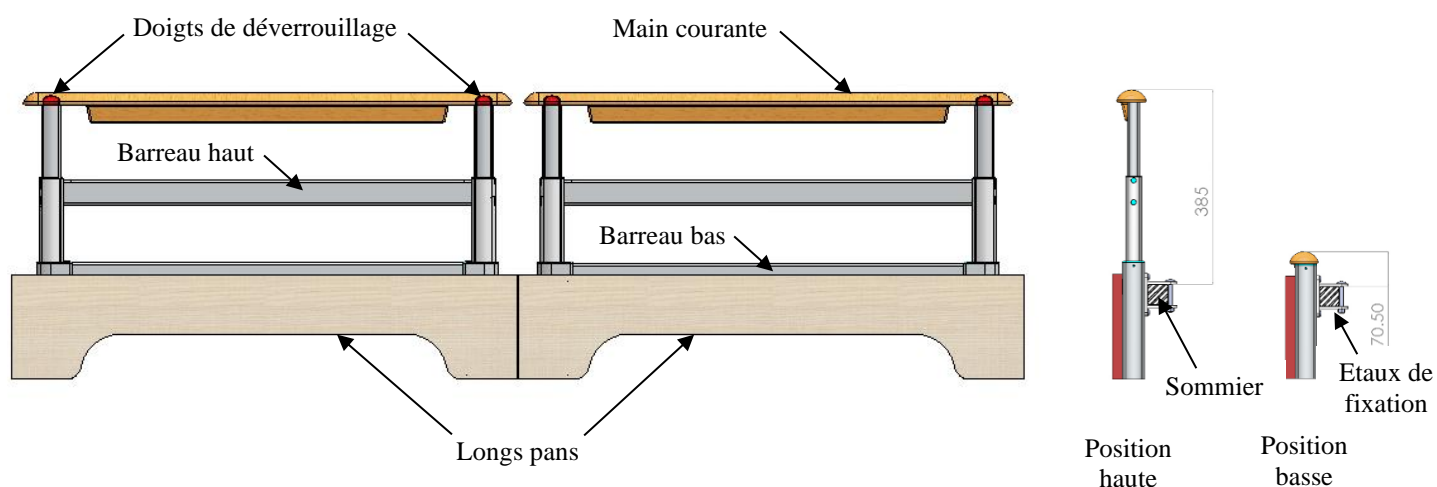


3.2. Montage


Les barrières télescopiques WINNCARE sont prévues pour être compatibles avec les panneaux prévus à cet effet (Stylvia, Novida, ...).

Celles-ci doivent être associées avec des matelas dont les caractéristiques techniques sont indiquées dans la notice du lit.


Pour l'assemblage :

- 1-Insérer les deux étaux de fixation sur le sommier du lit puis y insérer les vis TRCC ainsi que les entretoises
- 2-Décaler l'ensemble vers le panneau afin que le long pan de la barrière y soit en contact.
- 3-Sécuriser l'ensemble en visant les écrous aux vis TRCC.

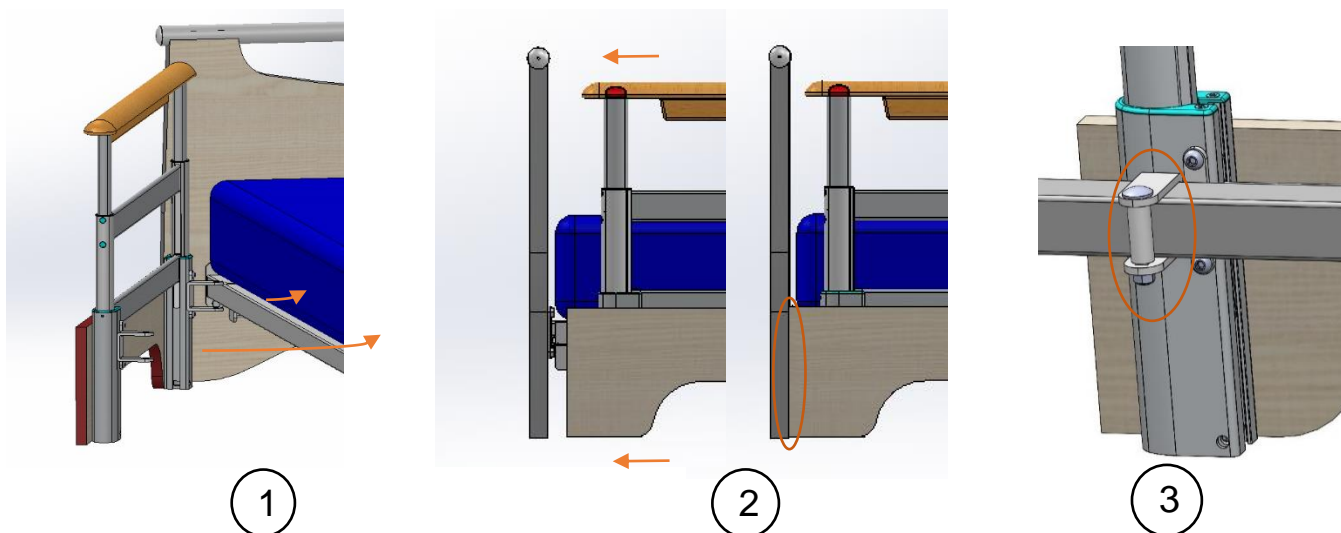

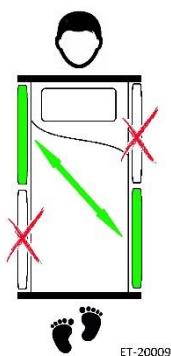

Des étiquettes d'emplacement sont apposées sur chaque barrière indiquant leurs positions possibles sur le lit.

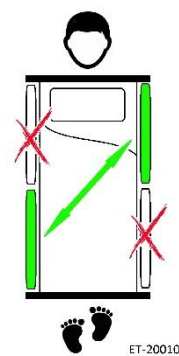

4. CONDITIONS D'UTILISATION

4.1. Fonction

Les barrières sont conçues pour éviter la chute des patients pendant leur sommeil et leur transport MAIS ne sont pas conçues pour empêcher un patient de sortir volontairement de son lit. De nombreux accidents surviennent lorsque le patient tente de sortir de son lit malgré les barrières en place.

Dans certains cas, la barrière permet d'éviter les chutes, MAIS elle peut représenter un danger : blessures, chutes après piégeage d'un membre dans la barrière, asphyxies suite au piégeage de la tête, du cou ou du thorax. Il est souhaitable de procéder à l'évaluation du rapport bénéfice/risque de la barrière, pour décider de l'utilisation ou non des barrières.

Cette évaluation doit prendre en compte :


- les capacités de surveillance du service : Un protocole harmonisé de l'établissement d'utilisation des barrières peut être rédigé.
- l'état physique et mental du patient : ses besoins, ses capacités, sa lucidité, sa taille, son agitation. Cette évaluation est à réitérer régulièrement.

4.2. Utilisation

- Pour lever la barrière :

1-En position intermédiaire :



- ① Soulever la main courante avec les 2 mains jusqu'à son verrouillage.
- ② Vérifier si elle est bien enclenchée en essayant de l'abaisser sans toucher aux doigts de déverrouillage.

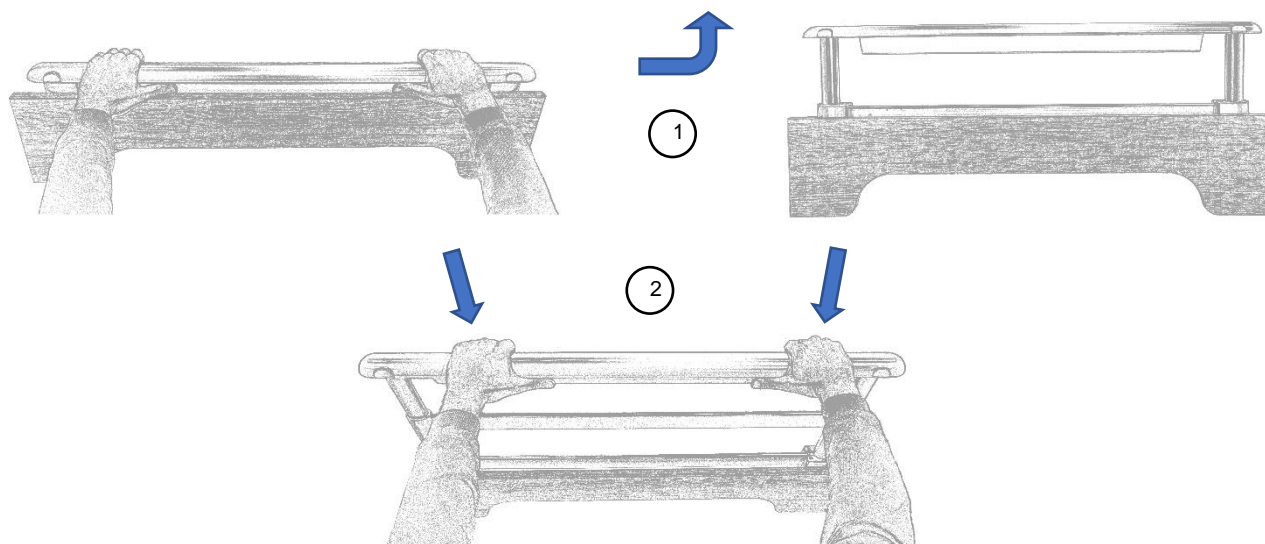

2-En position haute :

① Soulever la main courante avec les 2 mains en appuyant sur les deux doigts de déverrouillage jusqu'en haut puis relâcher les doigts avant la butée haute.

② Vérifier si elle est bien enclenchée en essayant de l'abaisser sans toucher au doigt de déverrouillage.

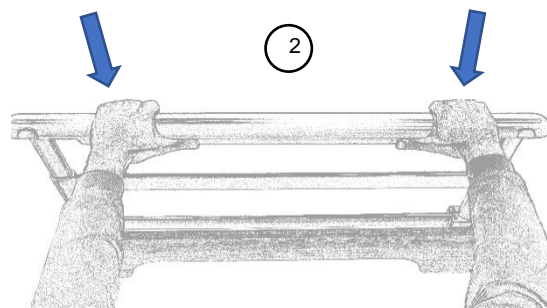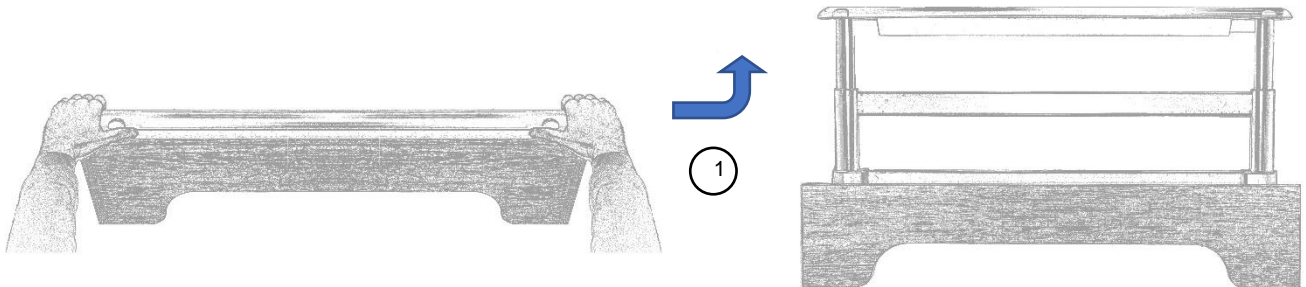


➤ Pour baisser la barrière :

① Soulever la main courante.

② Appuyer sur les doigts de déverrouillage avec les deux mains.

③ Accompagner la descente de la traverse jusqu'en bas.

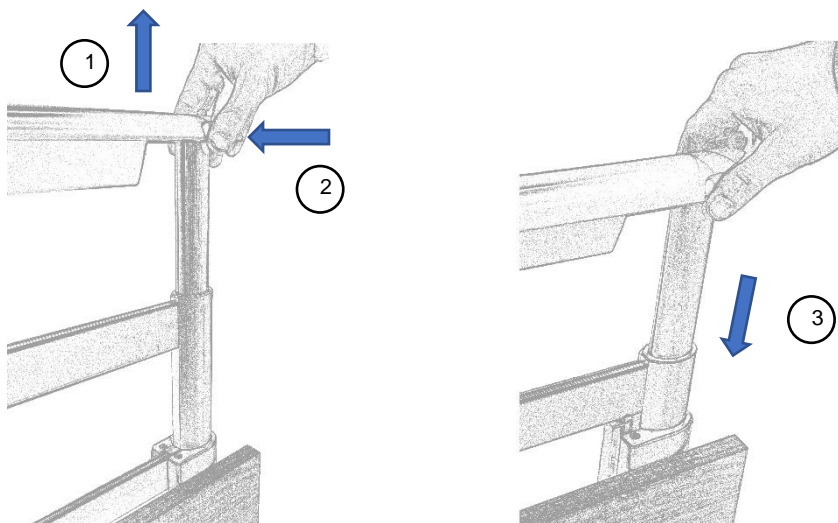

4.3. Précautions d'emploi



Un mauvais positionnement de la barrière peut être préjudiciable à la sécurité ou provoquer un dysfonctionnement. **Il est interdit d'utiliser la barrière lorsque les patients ne sont pas des adultes ou si leur morphologie est insuffisante ≤ 146 cm. $IMC < 17$.**



L'utilisateur ou le personnel doit être formé et informé des risques liés à l'utilisation du lit. Il doit en interdire celle-ci par des enfants et faire preuve de vigilance lors de l'utilisation par des personnes confuses ou désorientées.



La différence entre le haut de la barrière et la surface d'un matelas non thérapeutique et non comprimé doit être d'au moins 220 mm. Il conviendra de tendre vers cette spécification dans le cas de l'usage d'un matelas thérapeutique.

L'utilisation des barrières doit se faire par une personne se trouvant à l'extérieur du lit. Elle doit s'assurer qu'aucun objet ou corps se trouve dans la zone de fonctionnement de celles-ci.

La barrière est un dispositif médical, à ce titre nous vous informons qu'il ne doit en aucun cas être modifié. Vous devez assurer sa traçabilité. Si vous assemblez différents types de dispositifs médicaux, vous devez obligatoirement vérifier la conformité de l'ensemble constitué et procéder à la déclaration CE du nouveau dispositif médical.

Après chaque utilisation du lit et pendant le repos du patient, il est impératif de le mettre en position basse afin de protéger le patient de toute blessure (si l'état du malade le nécessite : personnes confuses, démentes ou personnes affaiblies physiquement).

Pour une assistance, si nécessaire, dans le montage, l'utilisation ou la maintenance ou pour signaler un fonctionnement ou des événements imprévus, appeler votre fournisseur ou **Winnicare**.

4.4. Risques résiduels

DANGER	CONSEQUENCE	PRESCRIPTION UTILISATEUR
Piégeage	Mains pincées	Manipuler la barrière par la main courante
Piégeage	Ecrasement corps ou objet	Vérifier avant de baisser la barrière que la zone de mouvement soit libre
Piégeage	Ecrasement corps ou objet	Vérifier avant de baisser le lit équipé de sa barrière que la zone de mouvement soit libre

5. CONDITIONS DE MAINTENANCE

5.1. Identification



5.2. Entretien

Un examen minutieux doit être mené sur la barrière au moins une fois par an sur les éléments tels que : les guides, les traverses et les doigts de verrouillage.

5.3. Nettoyage

Le nettoyage à haute pression est interdit.

Nettoyer la structure en utilisant de l'eau savonneuse avec un support doux puis rincer et essuyer. Tous les produits agressifs ou récurant tels que détergents, poudres, solvants et eau de javel sont interdits.

5.4. Désinfection

Isoler la barrière dans un local de désinfection équipé d'un système de filtration des particules et d'une évacuation pour le lavage des sols et des murs après désinfection.

Utiliser un produit désinfectant ayant des activités bactéricides, fongicides, virucides soit en pulvérisant un spray uniformément sur les surfaces ou en l'appliquant avec un linge à usage unique, soit en pulvérisant un aérosol désinfectant à une distance de 30 cm.

ATTENTION :

Respecter les précautions d'emploi des produits désinfectants indiquées sur ceux-ci.

Laisser sécher et préserver le matériel désinfecté des autres matériels non désinfectés par un film grâce à une étiquette indiquant la date de la désinfection.



Produit d'usage externe ne pas avaler, conserver à l'écart de la chaleur et éviter le contact avec les yeux

5.5. Durée de vie

La durée de vie dans des conditions normales d'utilisation et de maintenance est de 5 ans pour les accessoires, notamment les barrières latérales.

5.6. Garanties

- L'ensemble de nos fabrications sont garanties contre tout vice de fabrication, si les conditions normales d'utilisation et de maintenance sont respectées.
- Ne sont pas pris en considération les coûts de main d'œuvre, correspondant aux changements des structures ou des pièces sous garantie.
- Concernant les durées de garanties spécifiques à chaque produit, merci de vous reporter aux conditions générales de vente
- Lors de toute correspondance pour un entretien éventuel, il est impératif de nous communiquer les indications portées sur l'étiquette d'identification située sous la traverse.
- Le remplacement s'effectue par la fourniture de pièces d'origine dans la limite de la durée de garantie par notre réseau de revente déterminant le début de la période de garantie.
- Afin de permettre une bonne application de cette garantie et aussi éviter toute facturation, le retour des pièces défectueuses est obligatoire.

6. CONDITIONS DE MISE AU REBUT

- La mise au rebut du produit s'impose si les exigences essentielles ne sont plus respectées, notamment lorsque le produit n'a plus ses caractéristiques d'origine et que celui-ci n'a pas fait l'objet d'une reprise dans le processus de fabrication.
- Il faudra prendre les dispositions afin que celui-ci ne soit plus utilisable pour la fonction qui lui a été préalablement définie.
- Lors de la mise au rebut, il faudra respecter les normes environnementales du pays en vigueur.



4 Le Pas du Château
85670 SAINT PAUL MONT PENIT
TEL: +33 (0)2 51 98 55 64
Email: contact@winncare.fr
Website: <https://www.winncare.fr>